

Restvolumen

Restvolumen er den mængde væske og sondemad, der er tilbage i din mave fire timer efter måltidet. Maven bliver muligvis ikke altid tømt fuldstændigt. Restvolumen varierer og er blandt andet afhængig af aktivitet og kroppens stilling. Da restvolumen indeholder vigtige salte og næringsstoffer, skal den altid sprøjtes tilbage i maven igen.

Du kontrollerer restvolumen således: Sæt sprøjten med kateterspids til Mic-Key forlængerslangen og træk stemplet tilbage.

Kontrollér restvolumen hvis sondemaden løber tilbage i forlængerslangen, eller hvis du har kvalme. Prøv igen efter 30 minutter og genoptag måltidet, hvis mængden er mindre end ved første kontrol.