

**Mic-Key® Gastrostomiport'un  
(Gastrostomi düğmesinin)  
evde bakımı ve kullanışı**

**Günde bir defa yapılması önerilenler:**

1. Günlük yapılan sabah veya akşam temizliğinin bir bölümü olarak, stomanın etrafındaki deriyi günde bir defa yıkayın. Stomanın etrafındaki derinin kuru ve temiz tutulması gerekir.
2. Her yedirmeden önce ve sonra, aradaki parçaları 10-20 ml suyla yıkayın.

**Her hafta yapılması önerilenler:**

1. Haftada bir, balondaki suyun doğru miktarda olup olmadığını kontrol edin.
2. Orta parçayı, haftada bir (veya kullanmaya göre, daha da sık olarak) yenileyin.

**Her iki ayda bir yapılması önerilenler:**

Mic-Key® yi bir yiyecek aracı olarak görün ve kullanın. Bu nedenle iki ayda bir, Mic-Key® yi yenileyin. İki aylık kullanımdan sonra aracın rengi bozulup geriye dönüş pervanesi zayıflamış olur.

**DİKKAT!** Yemek yedirmede ağrı / rahatsızlık duyulduğunda yedirmeyi bırakıp hemşire veya doktora başvurun.

**Faydalı öneriler:**

1. Mic- ölçü cetveli yardımıyla stomanın uzunluğunu doğru olarak ayarlayın. Ölçü cetvelini devamlı olarak el altında bulundurun.
2. Mic-Key®'in bakımını rutin olarak yapın, örneğin:
  - Her pazartesi, balondaki suyundoğru miktarda olup olmadığını kontrol edin.
3. Mic-Key® le beslemede ve tüm bakımında, günlük beslenmede uygulanan iyi hijyeni düşünüp takip edin. Herhangi bir sterilize etme işlemine gerek yoktur.